

pneuv medi 6.7



+ SNADNÉ POUŽITÍ

Jednoduché dotykové ovládání. LCD displej. Naprogramovaný flashdisk. Uložení oblíbených terapií a jejich rychlé spuštění. České menu.

+ PŘÍSPĚVEK OD ZP

Pacientům s příslušnou diagnózou přispívá na přístroj i příslušenství z velké části zdravotní pojišťovna.

+ HODNOCENÍ LÉČBY

Průběžné ukládání dat o průběhu terapie na flashdisk. Možnost vyhodnocení účinnosti léčby.

+ VARIABILITA

Individuální program pro konkrétního uživatele. Okamžitá změna parametrů (tlaku) v průběhu cyklu.

+ ODBORNOST

58 přednastavených programů bylo vyvinuto ve spolupráci s předními českými odborníky z oblasti lymfologie, dermatologie, sportovního lékařství a rehabilitace.

Přístroj pro presoterapii a rehabilitaci určený zejména pro domácí léčbu, vybavený dotykovým ovládáním a ovládáním pomocí flashdisku.

Hlavní předností přístroje je schopnost provozu ve dvou programových režimech, základním a gradientu, možnost zpětné kontroly průběhu léčby pacienta a její evidence a výrazné rozšíření možností léčebné terapie při zachování jednoduchosti obsluhy. Proto je tento typ primárně určen pro domácí léčbu pacientů.

INDIKACE

- otoky na podkladě vrozeného nebo získaného poškození mízního systému (primární a sekundární lymfedém) otoky při onkologických indikacích (po ablaci, resekci uzlin, po radioterapii)
- chronická žilní nedostatečnost
- bolesti cévního původu (ateroskleróza tepen, zánět žil, žilní trombóza, křečové žíly, blokáda mízního řečiště)
- prevence hlubokého zánětu žil (před a po operacích)
- terapie bérceových vředů
- rehabilitace posttrombotického poškození
- poruchy prokrvení (Raynaudova nemoc, akrocyanóza)
- diabetická neuropatie a angiopatie
- otoky dolních končetin způsobené funkčním opotřebením kloubů (artróza)
- rehabilitace po extrémním svalovém zatížení končetin

KONTRAINDIKACE

- nedoléčené nebo recidivující maligní onemocnění
- nestabilizované bronchiální astma a chronická bronchitida
- ischemická choroba srdeční a jiné těžké srdeční onemocnění
- nestabilizovaný vysoký krevní tlak
- cévní mozková příhoda
- zvýšená funkce štítné žlázy
- otoky způsobené onemocněním ledvin
- choroby jater, epilepsie
- těhotenství
- alergické a edematózní onemocnění
- osteosyntéza a kloubní náhrady v léčené oblasti
- kardiostimulátor

TECHNICKÉ PARAMETRY	PNEUVEN MEDI 6.7
Typ přístroje	Pneufen Medi 6.7
Síťové napětí	100-240V/50/60/Hz
Příkon	36 W
Síťové pojistky	2 x T0, 8AL/250V
Tlačný výkon	max. 30 l/min
Tlak vzduchu v návleku	max. 30 kPa, omezeno na 12 kPa
Hmotnost přístroje	5 000 g
Rozměry	321,0 x 321,5 x 140,3 mm
Nastavení doby léčby	do 120 min nebo do 100 cyklů
Počet programů	58 základních programů
Pracovní režimy	základní režim, režim gradient
Odsávání návleku	Ne/Ano
Aplikace	lymfoterapie, fleboterapie

Lymfodrenáž

- 58 standardních masážních, rozmasírovacích a kombinovaných programů pro masáž končetin a jejich částí.
- programový režim základní (zvolená rychlost tlakové vlny je konstantní a výsledný zvolený tlak ve všech komorách návleku je stejný)
- režim GRADIENT (zvolená rychlost tlakové vlny je konstantní a zvolený tlak klesá v komorách návleku od periferie k centru)
- ovládání pomocí naprogramovaného flashdisku nebo manuálně pomocí dotykových tlačítek na čelním panelu
- možnost hodnocení účinnosti léčby pacienta lékařem, průběžné ukládání dat o průběhu terapie

Příslušenství

Návleky pro lymfatickou masáž: ruka s ramenem, ruka, kalhoty, noha, boky/hýždě

3,7 resp. 14 překrývajících se komor, konektory pro snadné připojení



Výrobce má certifikovaný systém jakosti v oboru výroba, prodej a servis zdravotnických přístrojů dle ČSN EN ISO 13485:2012 a ČSN EN ISO 9001:2009

TERAMED

TERA-MED MEDICAL, s. r.o., Tusarova 1519/22, Praha 7, 170 00

Provozovna: Ovčáry 214, 277 14

Tel: 776 49 34 34

Email: tera-med@email.cz

pneufen